

## **Betriebsanleitung für die Dermalux® Multimedia-Cam**

### **Betrieb der Dermalux® Checkbox mit der Dermalux® Multimedia Cam**

Das Farbkamera-Modul (1) an die Dermalux® Checkbox Multimedia anschließen. Dazu vorsichtig den am Kurzkabel des Kameramoduls befindlichen Stecker in die an der rechten Gehäuseseite der Checkbox OBEN befindliche Buchse stecken. Dabei den Stecker vor dem Einsetzen exakt ausrichten, sodass er entsprechend ohne Druck auf die in der Steckbuchse befindlichen Stifte rutscht, ohne diese zu beschädigen. Vor Inbetriebnahme die kleine Schutzkappe vom Kamera-Auge entfernen. Schärfeneinstellung nach Wunsch am Objektiv manuell vornehmen. Bei Beamer-Betrieb erst nach dessen Scharfstellung evtl. noch kleine Korrekturen vornehmen, falls erforderlich.

### **Anschluss der Dermalux® Multimedia Cam an TV-Geräte**

Cinch-Anschlussleitung (3) ebenfalls an die Dermalux® Checkbox Multimedia anschließen. Die Buchse für den Cinch-Stecker befindet sich auf der Geräterückseite unten. Jetzt verbindet man die Cinch-Leitung mit dem TV-Gerät oder Monitor. Für Wiedergabe-Geräte mit Scart-Buchse zunächst den Scart-Adapterstecker (2) an die Cinch-Anschlussleitung (3) anschließen und dann über die dafür vorgesehene Scart-Buchse am Wiedergabe-Gerät die Verbindung herstellen. Video/AV-Einstellung am TV-Gerät wählen.

### **Anschluss der Dermalux® Multimedia Cam an Beamer**

Cinch-Anschlussleitung (3) ebenfalls wie oben beschrieben an die Dermalux® Checkbox Multimedia anschließen und über den Video-Eingang mit dem Beamer verbinden. Für Beamer mit Scart-Buchse zunächst den Scart-Adapterstecker (2) an die Cinch-Anschlussleitung (3) anschließen und dann über die dafür vorgesehene Scart-Buchse am Beamer die Verbindung herstellen.

### **Reparaturservice**

Ingenieurbüro Ott, Auf dem Meer 4, 56333 Winnigen. Telefon 02606 / 963 28-0

### **Bezugsadresse und Informationen**

KBD GmbH, Kaiserstrasse 35, D-69469 Weinheim  
Fon: +49 (0) 6201 - 59 00 65  
mailto: info@dermalux.de